

Great Lakes NOLA Quick Fit Headcap

Placér enden af trykknappen i det ønskede hul, og tryk eller rul derefter hver efterfølgende trykknop ind i det tilsvarende hul mens remmene holdes i en bue.

Blødt formstøbt plast


Fuldt justérbare remme
Passer til alle patienter
Intet behov for hæftning

Seks snap-positioner, der leverer en kraftvektor 10° under til 40° over okklusalplanet


Trykknapper og rør til brug med j-kroge

Snap-on elastiske bånd til brug med ansigtsbuer


Trykknapper og puder kan udskiftes (300-135)

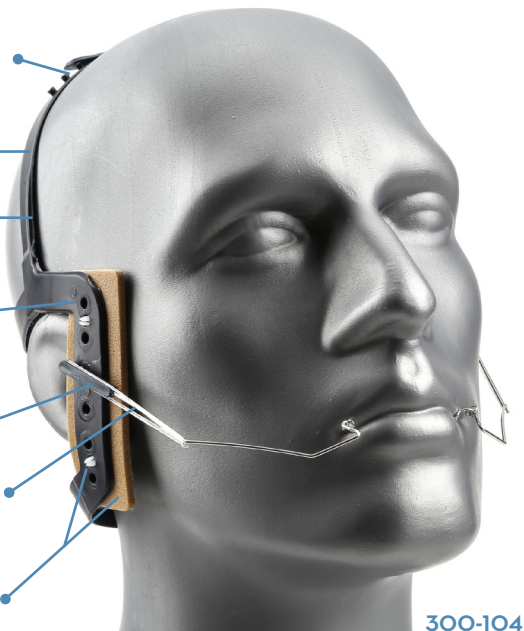

300-104

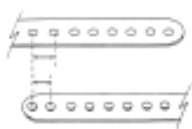

Remmens huller er ikke anbragt direkte overfor trykknapperne, så når den klikkes sammen, vil remmen danne en kurve.

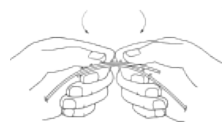

BESTILLINGSOPLYSNINGER PÅ BAGSIDEN ►

NOLA sikkerhedsfordel med J-krog Headgear

I sammenligning med de forhåndenværende afbryderanordninger, der bruges med ansigtsbuer i øjeblikket, er J-Hook Headgear lige så sikre eller mere sikre. Der er potentiel risiko ved ansigtsbuer, fordi begge sider er forbundet, så de indre buerender er centreret i forhold til ansigtet.

Desuden tillader de fleste afbryderanordninger, at ansigtsbuen kan lempes ud af munden, før der opnås en løsrivelsesmodstand.

j-krogen har følgende fordele:

1. Højre og venstre krog er ikke forbundet. Hvis en af dem løsner sig, vil den blive trukket ud og bort fra ansigtet.
2. J-krogens vandring frem og tilbage er begrænset af den bøjede ende og den svejsede elastiske krog. (Fig. A)

3. Headcap til hurtig montering giver den ekstra fordel, at røret kan løsnes fra headcap'en, hvis der pludselig bliver trukket hårdt i denne

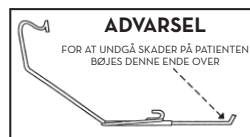


Fig. A

ARTIKEL	BESTILLINGSNR.
Headcaps, j-kroge og tilbehør	
Headcap, variabelt træk (5/kg)	Sort 300-100 Mørkeblå 300-101 Brun 300-102
Headcap, højt træk (5/kg)	Sort 300-107 Mørkeblå 300-103 Brun 300-105
Headcap, hurtig montering (5/kg)	300-104
J-krog, hjørnetand/glidebue retraction (5 par/kg)	300-121
J-krog, præmolar til retraction (5 par/kg)	300-122
J-krog, hjørnetand/glidebue retraction: Lang (5 par/kg)	300-123
J-krog med høj trækstyrke (5 par/kg)	300-125
J-krog med høj trækstyrke: Lang (5 par/kg)	300-126
Rør i rustfrit stål til headcap med variabelt træk (10/kg)	300-131
Snap-on-rør til headcap med hurtig montering (10/kg)	300-132
Snap-on-kroge til Headcap med hurtig montering (10/kg)	300-133
Glidepuder af stof (20/kg)	300-134
Snap-on-puder til alle headcaps (20/kg)	300-135
Protraktions-headgear og reservedele	
Lille ansigtsmaske	300-306
Stor ansigtsmaske	300-307
Lille Hickham	300-308
Stor Hickham	300-309
Hovedrem til Hickham (begge str.)	300-312
Panderem og låsemøtrikker til ansigtsmaske (begge str.)	300-313
Låsemøtrikker til panderem (2/kg)	300-314
Beskyttelsesspidser af plast (10/kg)	300-316

VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGERNE! For at undgå risiko for øjenskader skal du sørge for at informere patienter og forældre om de rette sikkerhedsforanstaltninger ved anbringelse og fjernelse af anordningen. Advar også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens anordningen er påsat.