

Casque à fixation rapide Great Lakes NOLA

Placez le bouton de clipsage dans le trou souhaité, puis appuyez ou faites rouler chaque clip suivant pour l'insérer dans le trou correspondant tout en maintenant les sangles dans une forme incurvée

Plastique moulé souple


Sangles entièrement réglables
S'adapte à tous les patients
Sans agrafage

Six positions de clipsage qui délivrent un vecteur de force de 10° en dessous à 40° au-dessus du plan occlusal


Tubes clipsables à utiliser avec les crochets en J

Bandes élastiques clipsables pour utilisation avec les arcs faciaux


Les clips et les coussinets sont remplaçables (300-135)

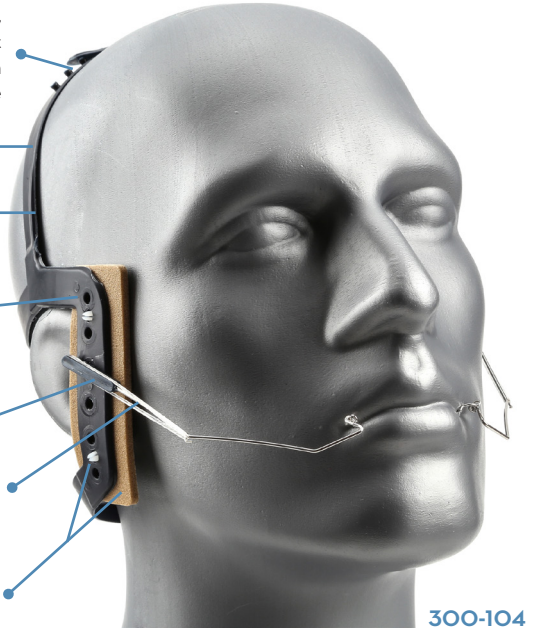

300-104

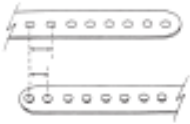

Les trous de la sangle ne sont pas disposés en face des boutons de clipsage ; ainsi, lorsque ceux-ci sont clipsés, la sangle forme une courbe.

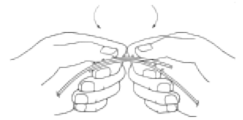

[INFORMATIONS POUR LA COMMANDE AU VERSO](#)

Une sécurité assurée avec le harnais à crochet en J NOLA

Les harnais à crochet en J sont aussi sûrs, voire plus sûrs, que les dispositifs amovibles utilisés avec les arcs faciaux actuels. Les arcs faciaux sont potentiellement dangereux car les deux côtés sont reliés en gardant les extrémités de l'arc intérieur centrées sur le visage.

De plus, la plupart des dispositifs amovibles permettent de retirer l'arc facial de la bouche avant que la force de rupture ne soit atteinte.

Le crochet en J présente les avantages suivants:

1. Les crochets droit et gauche ne sont pas reliés. Si l'un ou l'autre se détache, il le fera vers l'extérieur, loin du visage.
2. Le mouvement en avant et en arrière du crochet en J est limité par l'extrémité coudée et le crochet élastique soudé. (Fig. A)
3. Le casque à fixation rapide offre l'avantage supplémentaire de désolidariser le tube du casque en cas de traction brutale.



Fig. A

ARTICLE	RÉFÉRENCE
Casques, crochets en J et accessoires	
Casque à traction variable (lot de 5)	Noir 300-100 Marine 300-101 Marron 300-102
Casque à forte traction (lot de 5)	Noir 300-107 Marine 300-103 Marron 300-105
Casque à fixation rapide (lot de 5)	300-104
Crochet en J pour rétraction de la cuspide ou de l'arc coulissant (lot de 5)	300-121
Crochet en J pour rétraction de la bicuspide (lot de 5 paires)	300-122
Crochet en J pour rétraction de la cuspide ou de l'arc coulissant: Long (lot de 5 paires)	300-123
Crochet en J pour rétraction à traction forte (lot de 5 paires)	300-125
Crochet en J pour rétraction à traction forte: Long (lot de 5 paires)	300-126
Tubes en acier inoxydable pour casque à traction variable (lot de 10)	300-131
Tubes clipsables pour casque à fixation rapide (lot de 10)	300-132
Crochets clipsables pour casque à fixation rapide (lot de 10)	300-133
Coussinets en tissu, à enfiler (lot de 20)	300-134
Coussinets à clipser, pour tous les casques (lot de 20)	300-135
Casque de traction et pièces de rechange	
Masque Petit format Masque Grand forma	300-306 300-307
Hickham Petit modèle Hickham Grand modèle	300-308 300-309
Sangle pour Hickham (pour les deux modèles)	300-312
Sangle frontale et écrous de serrage pour masque (pour les deux modèles)	300-313
Écrous de serrage pour sangle frontale (lot de 2)	300-314
Embouts de protection en plastique (lot de 10)	300-316

RAPPEL IMPORTANT POUR LES MÉDECINS! Pour éviter tout risque de blessure aux yeux, veuillez à informer les patients et les parents des précautions à prendre lors de la mise en place et du retrait de l'appareillage. Mettez également en garde les patients contre tout jeu brutal ou risqué lorsque l'appareillage est en place.

