

# Arco de ajuste rápido Great Lakes NOLA

Coloque el broche final en el orificio deseado, luego presione o escuche cada chasquido sucesivo en su orificio correspondiente a la vez que sostiene las correas en forma curva.

Plástico moldeado blando


Correas totalmente ajustables  
Se adapta a cualquier paciente  
No requiere grapas

Seis posiciones de presión que ejercerán un vector de fuerza de  $10^\circ$  por debajo de  $40^\circ$  por encima del plano oclusal


Tubos a presión para utilizar con ganchos en J

Bandas elásticas a presión para usar con arcos faciales


Los broches y almohadillas se pueden reemplazar (300-135)

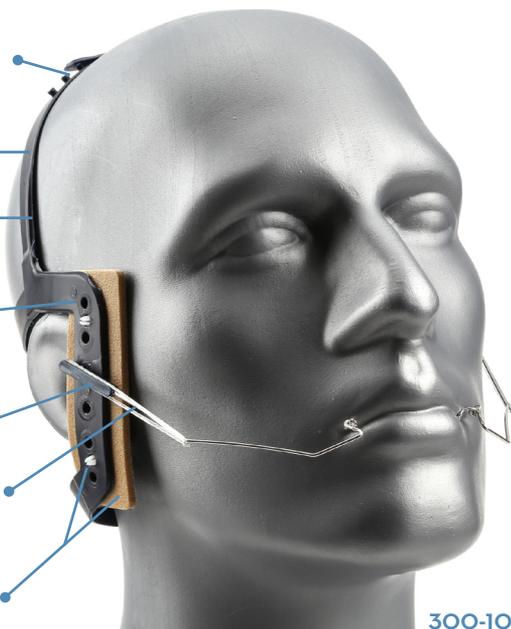

300-104

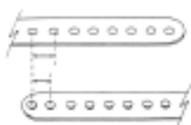

Los orificios de la correa no están espaciados directamente frente a los broches, de modo que cuando se unan, la correa formará una curva.

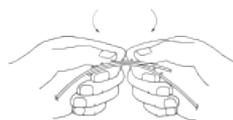

**INFORMACIÓN PARA PEDIDOS AL DORSO ►**

## Ventaja de seguridad del aparato extraoral con gancho en J de NOLA

En comparación con los dispositivos desmontables que se utilizan con los arcos faciales actualmente disponibles, el aparato extraoral con gancho en J es igual o más seguro. Los arcos faciales son potencialmente peligrosos porque ambos lados están conectados manteniendo los extremos internos del arco centrados con la cara.

Además, la mayoría de los dispositivos desmontables permiten sacar el arco facial de la boca antes de que se alcance una fuerza de rotura.

## El gancho en J tiene las siguientes ventajas:

1. Los ganchos derecho e izquierdo no están conectados. Si alguno de los dos se suelta, se saldrá y se desprenderá de la cara.
2. El recorrido hacia adelante y hacia atrás del gancho en J está limitado por el extremo doblado y el gancho elástico soldado. (Fig. A)
3. El arco de ajuste rápido ofrece la ventaja adicional de que puede desabrochar el tubo del arco si se produce un tirón repentino y fuerte.



Fig. A

ARTÍCULO	NÚMERO DE PEDIDO
<b>Arcos, ganchos en J y accesorios</b>	
Arco de tracción variable (5 por paquete)	Negro 300-100 Azul marino 300-101 Marrón 300-102
Arco de tracción alta (5 por paquete)	Negro 300-107 Azul marino 300-103 Marrón 300-105
Arco de ajuste rápido (5 por paquete)	300-104
Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante (5 pares/paquete)	300-121
Gancho en J de retracción bicuspídea (5 pares/paquete)	300-122
Gancho en J de retracción del arco cuspídeo/deslizante: largo (5 pares/paquete)	300-123
Gancho en J de alta retracción (5 pares/paquete)	300-125
Gancho en J de alta retracción: largo (5 pares/paquete)	300-126
Tubos de acero inoxidable para arco de tracción variable (10 por paquete)	300-131
Tubos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)	300-132
Ganchos a presión para arco de ajuste rápido (10 por paquete)	300-133
Almohadillas de tela deslizables (20 por paquete)	300-134
Almohadillas a presión para todos los arcos (20 por paquete)	300-135
<b>Aparato extraoral de protracción y piezas de recambio</b>	
Máscara facial pequeña Máscara facial grande	300-306 300-307
Hickham pequeño Hickham grande	300-308 300-309
Correa para la cabeza Hickham (ambos tamaños)	300-312
Correa para la frente y contratuercas para máscara facial (ambos tamaños)	300-313
Contratuercas para correa de frente (2 por paquete)	300-314
Puntas protectoras de plástico (10 por paquete)	300-316

**¡RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS MÉDICOS!** Para evitar el riesgo de lesiones oculares, asegúrese de informar a los pacientes y a los padres sobre las precauciones de seguridad adecuadas al colocar y extraer el aparato. También advierta a los pacientes que no deben jugar de forma brusca o correr riesgos innecesarios mientras lo lleven puesto.