


# Great Lakes NOLA Variable Pull Headcap

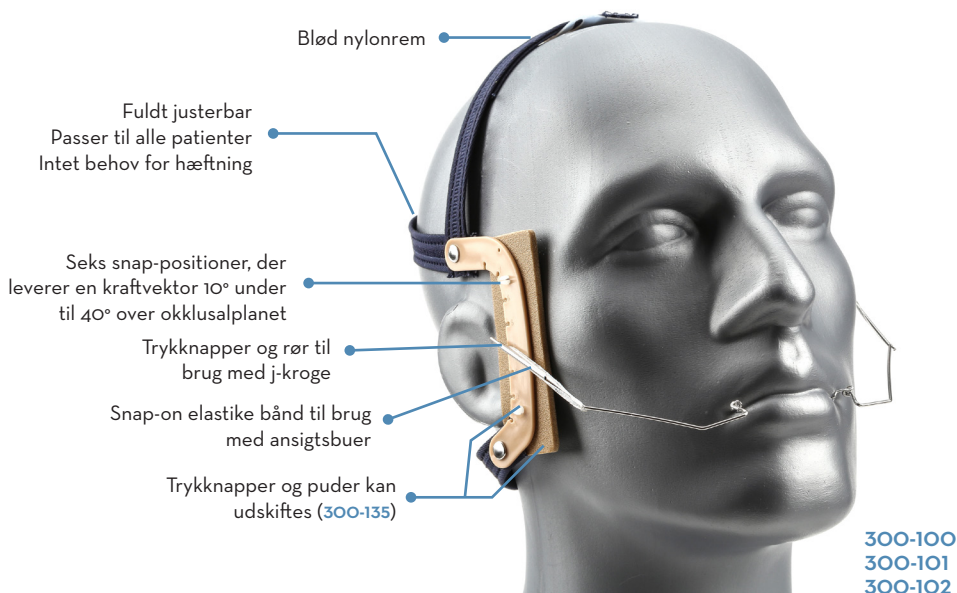

Blød nylonrem

Fuldt justerbar  
Passer til alle patienter  
Intet behov for hæftning

Seks snap-positioner, der  
leverer en kraftvektor 10° under  
til 40° over okklusaltplanet


Trykknapper og rør til  
brug med j-kroge

Snap-on elastiske bånd til brug  
med ansigtsbuer

Trykknapper og puder kan  
udskiftes (300-135)

300-100  
300-101  
300-102

BESTILLINGSOPLYSNINGER PÅ BAGSIDEN ►

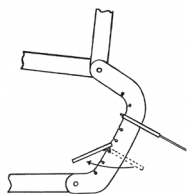

Trækretningen bestemmes af j-krogens og rørehedens placering på ansigtspladen. Denne position kan nemt ændres. Røret fjernes ved at dreje det 180° og derefter rulle rørkrogen ud af nøglehullet i ansigtspladen.

## NOLA sikkerhedsfordel med J-krog Headgear

I sammenligning med de forhåndenværende afbryderanordninger, der bruges med ansigtsbuer i øjeblikket, er J-Hook Headgear lige så sikre eller mere sikre. Der er potentiel risiko ved ansigtsbuer, fordi begge sider er forbundet, så de indre buerender er centreret i forhold til ansigtet.

Desuden tillader de fleste afbryderanordninger, at ansigtsbuen kan lempes ud af munden, før der opnås en løsrivelsesmodstand.

### j-krogen har følgende fordele:

1. Højre og venstre krog er ikke forbundet. Hvis en af dem løsner sig, vil den blive trukket ud og bort fra ansigtet.
2. J-krogens vandrings frem og tilbage er begrænset af den bøjede ende og den svejsede elastiske krog. (Fig. A)

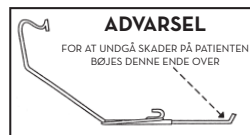


Fig. A

#### ADVARSEL

FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PATIENTEN  
BØJES DENNE ENDE OVER

ARTIKEL	BESTILLINGSNR.
<b>Headcaps, j-kroge og tilbehør</b>	
Headcap, variabelt træk (5/kg)	Sort 300-100 Mørkeblå 300-101 Brun 300-102
Headcap, højt træk (5/kg)	Sort 300-107 Mørkeblå 300-103 Brun 300-105
Headcap, hurtig montering (5/kg)	300-104
J-krog, hjørnetand/glidebue retraction (5 par/kg)	300-121
J-krog, præmolar til retraction (5 par/kg)	300-122
J-krog, hjørnetand/glidebue retraction: Lang (5 par/kg)	300-123
J-krog med høj trækstyrke (5 par/kg)	300-125
J-krog med høj trækstyrke: Lang (5 par/kg)	300-126
Rør i rustfrit stål til headcap med variabelt træk (10/kg)	300-131
Snap-on-rør til headcap med hurtig montering (10/kg)	300-132
Snap-on-kroge til Headcap med hurtig montering (10/kg)	300-133
Glidepuder af stof (20/kg)	300-134
Snap-on-puder til alle headcaps (20/kg)	300-135
<b>Protraktions-headgear og reservedele</b>	
Lille ansigtsmaske	300-306
Stor ansigtsmaske	300-307
Lille Hickham	300-308
Stor Hickham	300-309
Hovedrem til Hickham (begge str.)	300-312
Panderem og låsemøtrikker til ansigtsmaske (begge str.)	300-313
Låsemøtrikker til panderem (2/kg)	300-314
Beskyttelsesspidser af plast (10/kg)	300-316

**VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGERNE!** For at undgå risiko for øjenskader skal du sørge for at informere patienter og forældre om de rette sikkerhedsforanstaltninger ved anbringelse og fjernelse af anordningen. Advar også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens anordningen er påsat.