

Great Lakes NOLA Kopfkappe mit variablem Zug

Weiches Nylonband


Vollständig einstellbar
Passt für jeden Patienten
Keine Klammerung
erforderlich

Sechs Einrastpositionen,
die einen Kraftvektor von
10° unter bis 40° über der
Okklusionsebene erzeugen

Schnappverbindung für die Röhren
bei Verwendung mit J-Haken


Einrastbare Gummibänder zur
Verwendung mit Gesichtsbögen

Einraster und Pads sind
austauschbar (300-135)

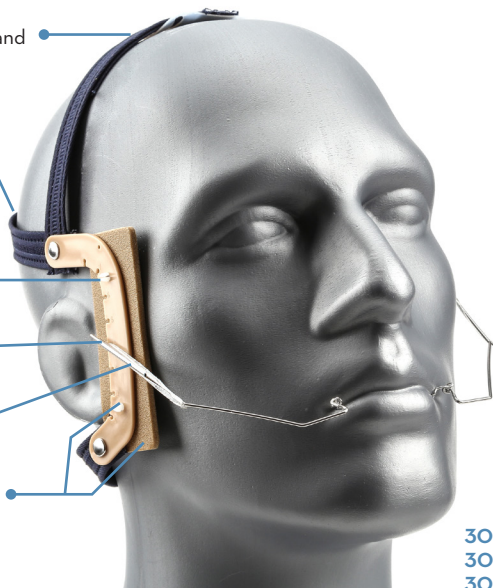

300-100
300-101
300-102

BESTELLINFORMATIONEN AUF DER RÜCKSEITE ►

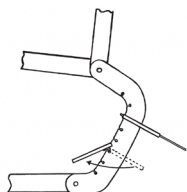

Die Zugrichtung wird durch die Position des J-Hakens und des Röhrchens auf der Gesichtsplatte bestimmt. Diese Position kann einfach verändert werden. Das Röhrrchen wird entfernt, indem es um 180° gedreht und dann der Haken des Röhrchens aus dem Loch in der Gesichtsplatte geschwenkt wird.

Der Sicherheitsvorteil des NOLA J-Haken-Headgear

Im Vergleich zu den derzeit erhältlichen Gesichtsbögen mit Überlastungsschutz sind J-Haken-Headgears genauso sicher oder sicherer. Gesichtsbögen sind potenziell gefährlich, da beide Seiten miteinander verbunden sind und die inneren Bogenenden mit dem Gesicht zentriert sind.

Des Weiteren können die meisten Gesichtsbögen mit Überlastungsschutz aus dem Mund genommen werden, bevor die Abreißkraft erreicht ist.

Der J-Haken hat folgende Vorteile:

1. Der rechte und der linke Haken sind nicht miteinander verbunden. Sollte sich einer der beiden lösen, wird er herausgezogen und vom Gesicht entfernt.
2. Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des J-Hakens wird durch das gebogene Ende und den angeschweißten elastischen Haken begrenzt. (Abb. A)



Abb. A

ARTIKEL	BESTELL-NR.
Kopfkappen, J-Haken & Zubehör	
Kopfkappe mit variablem Zug (5/Pkg)	Schwarz 300-100 Marineblau 300-101 Braun 300-102
Kopfkappe mit Hochzug (5/Pkg)	Schwarz 300-107 Marineblau 300-103 Braun 300-105
Quick Fit-Kopfkappe (5/Pkg)	300-104
J-Haken für die Retraktion des Eckzahns/Zahnbogens (5 Paar/Pkg)	300-121
J-Haken für die Retraktion beider Eckzähne (5 Paar/Pkg)	300-122
Auf dem Zahnbogen gleitender J-Haken für die Retraktion des Eckzahns: Lang (5 Paar/Pkg)	300-123
J-Haken für die Retraktion mit Hochzug (5 Paar/Pkg)	300-125
J-Haken für die Retraktion mit Hochzug: Lang (5 Paar/Pkg)	300-126
Edelstahlröhrchen für Kopfkappe mit variablem Zug (10/Pkg)	300-131
Schnappverbindung für Quick Fit-Kopfkappe (10/Pkg)	300-132
Schnapphaken für Quick Fit-Kopfkappe (10/Pkg)	300-133
Aufschiebbare Stoffpads (20/Pkg)	300-134
Pads mit Schnappverbindung für alle Kopfkappen (20/Pkg)	300-135
Protraction Headgear & Ersatzteile	
Kleine Gesichtsmaske	300-306
Große Gesichtsmaske	300-307
Kleiner Hickham	300-308
Großer Hickham	300-309
Kopfband für Hickham (beide Größen)	300-312
Stirnband und Kontermuttern für Gesichtsmaske (beide Größen)	300-313
Kontermuttern für Stirnband (2/Pkg)	300-314
Kunststoffschutzkappen (10/Pkg)	300-316

WICHTIGE ERINNERUNG FÜR ÄRZTE! Um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie Patienten und Eltern über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Anlegen und Abnehmen des Headgears informieren. Warnen Sie die Patienten auch vor wildem oder riskantem Spielen, solange der Headgear getragen wird.